

CLOVER 7

Elektroniskt förstöringsglas

Användarguide

Rev B

Innehåll

Skötsel

1

Snabbstart

3

Översikt

3

Enhetens delar - förklaring

5

Tillbehör

8

Ladda batteriet

9

Stand

inte definierat.

Fel! Bokmärket är

Funktion

13

Strömbrytaren	13
Pip ljud typ	14
Förstoring	15
Färgläge	15
Ljusstyrka	17
Belysning	18
Bild Freeze /frys	18
Bildlagring	20
Bildvisning	20
Linje & mask	22

Fokuskontroll	23
Minne	24
Auto energispar	24
Återställning -fabriksinställningar	24
Hårdvaruåterställning	25
Felsökning	25
Enheten slås inte på	25
Svart skärm eller vit skärm	26
Bilden ändras inte	26
Fläckar eller smuts på skärmen	27

Specifikationer

27

Skötsel



Innan du använder CLOVER 7 för första gången måste du ladda batteriet. Hänvisning till avsnitt **Ladda batteriet** för mer information.



Använd alltid enheten på en plats där temperaturen är mellan 10 ° och 35 ° C (50 ° och 95 ° F)



Håll enheten på avstånd från våtutrymmen, regn, och andra källor av vätskor.



Försök inte att reparera enheten. Alla försök medför garantin ogiltig. Kontakta din återförsäljare för service.



Använd alltid den medföljande nätadaptern och batteriet.


Snabbstart

Översikt


Tack för att du valt CLOVER 7.

CLOVER 7 är ett bärbart 7 tums elektroniskt förstoringsglas, med hög bildkvalitet.

Enheten erbjuder läsning med förstoring (zoom), skriva i förstorat läge, frysa och lagra bilder. Denna enhet är perfekt för nära visning såsom etiketter, böcker, tidningar etc, och på långt håll (när stativet viks in).

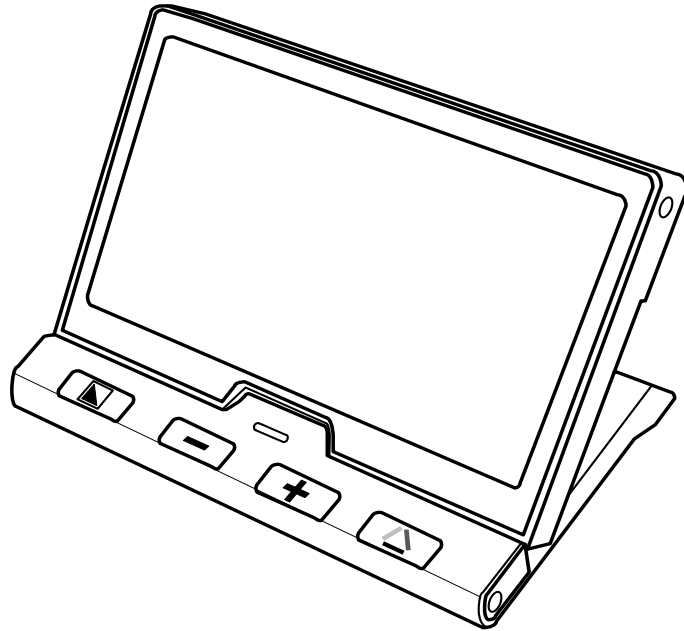

Enhetens delar - förklaring

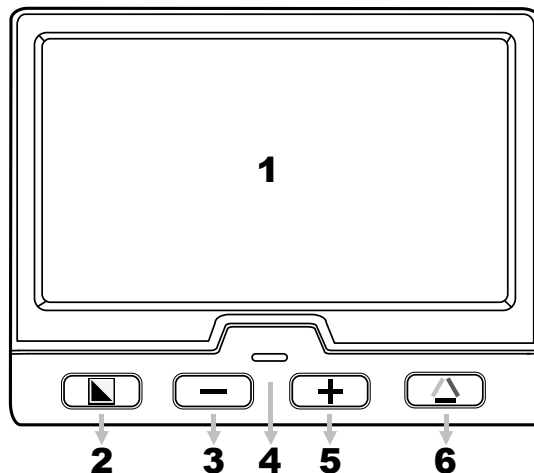

1. LCD-skärm


3. Zooma ut

5. Zooma in

2. Förstärkt Färg

4. Power LED


6. True Color

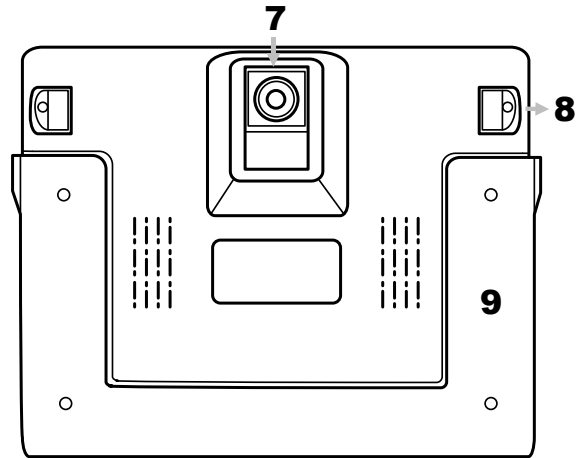

7. Kamera

8. LED-lampor

9. Stativ

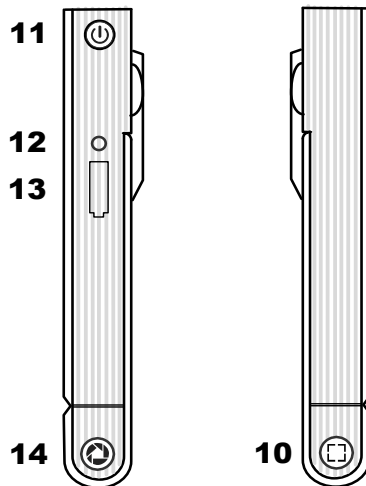

10. Fokuskontroll

12. Strömuttag

14. Freeze / Frys


11. Strömbrytaren

13. USB-port


Tillbehör




Handbok

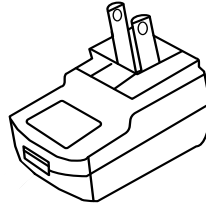


Strömadapter

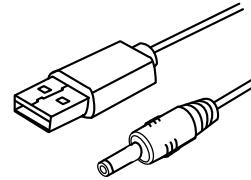

Ström Kabel

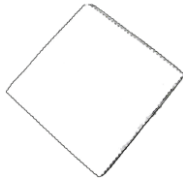


Rengöringsduk

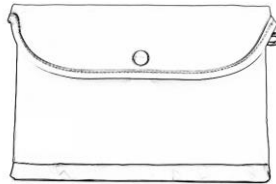

Väska

Ladda batteriet

1. Anslut den medföljande strömkabeln till nätadaptern
2. Anslut den medföljande nätkabeln till eluttaget i enheten
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag och börja ladda

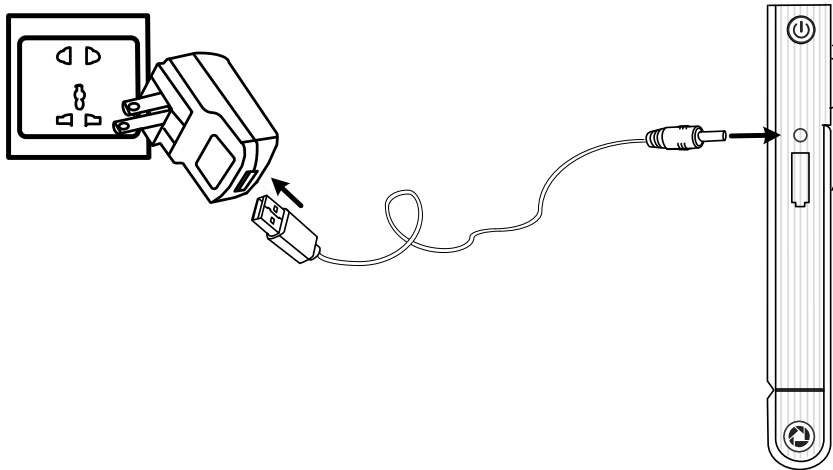

Ström LED indikator


- Laddning då enheten är avstängd, strömindikatorn är grön, automatiskt avstängning när det är fulladdat. Full laddning tar ca 5 timmar, och kommer att ger enheten ca 5 timmars kontinuerligt arbete.
- När enheten är på, strömindikatorn är grön vid användning av nätadaptern
- När enheten är påslagen och strömadaptern inte är ansluten, kommer strömindikatorn att vara grön så länge som batteriet har laddning, blir röd när batteriet är lågt. När den röda lampan börjar blinka, måste du ladda batteriet

- Du kan också kontrollera batteristatus genom att trycka på strömbrytaren; Se instruktioner nedan för mer information

Stativ




Det vikbara stativet används för bekväm ergonomisk läsning. Fäll ut stativet som figur nedan visar.

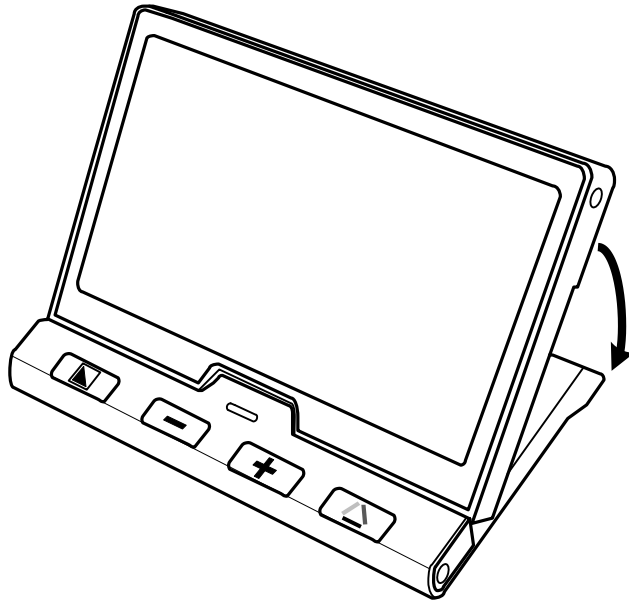Kameran kan roteras, bilden följer med, gäller både nära visning och på avstånd.



Funktion

Strömbrytaren

- Tryck och håll in strömknappen  3 sekunder för att sätta på enheten när den är avstängd
- Tryck och håll in strömknappen  3 sekunder för att vända off enheten när den är on
- Tryck på strömbrytaren  att kontrollera aktuell status för batterikapacitet, frysa läget , Fokusera status, och pip

- ❑ Tryck på annan knapp när håller strömbrytaren kommer att göra combo funktion, Se följande instruktioner för mer information





Pip ljud typ

- Enhet på / av pip
- Knapp pip
- Tröskel – högst/lägst av nivå pip
- Låg batteri pip

Pip ljud KONTROLL:

- ❑ Tryck och håll frysa knapp  i 3 sekunder för att slå på / stänga av pip


Förstoring


- ❑ Tryck på Zoom Jagn-knappen  att öka förstoringen och Håll knappen Zooma in  för kontinuerlig ökande
- ❑ Tryck på Zoom Ut knapp  att minska förstoringen, och Håll knappen Zooma ut  för kontinuerlig minskande

- Förstorings intervall:
Stå på objektytan: 2.2x - 16X

Färgläge

Full färgläget är lämplig för tex bilder, karta etc. Kontrast (två-färg) kombineras i olika för- och bakgrundsfärger för individuell bästa läsning av text.

- ❑ Tryck Kontrast  knappen, går runt i en lista med tvåfärgskombinationer

- ❑ Tryck den Färgläge knappen  återgår till Full färgläge

- ❑ Håll ner Kontrast knapp 5 sekunder för att växla mellan 2 listor. De korta förenklade färgkombination listan och den längre fabriksinställda listan

Den förenklad Färgkombination listan (5 lägen):



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vitt på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på vitt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gul på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Vit på Blå |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gul på Blå | |

Integrated Förbättrad färgkombination List (18 lägen)

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vitt på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på vitt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gul på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på gult |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vit på blå | <input checked="" type="checkbox"/> Blå på vit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gul på blå | <input checked="" type="checkbox"/> Blå på gult |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grön på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på grönt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Violet på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på violet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blå på svart | <input checked="" type="checkbox"/> Svart på blå |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vit på grönt | <input checked="" type="checkbox"/> Grön på vit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vit på rött | <input checked="" type="checkbox"/> Rött på svart |

Ljusstyrka

Justera displayens ljusstyrka för både Färgläge och Kontrastläge. Fabriksstandardvärdet blir markerad grön.



- ❑ Tryck: Strömbrytare  och knappen Zooma in $+$, ökar ljusstyrkan
- ❑ Tryck: Strömbrytare  och Zoom ut knapp $-$, minskar ljusstyrkan



Belysning

- ❑ Tryck: Ström  & Freeze/frys -knapp , slår på / av LED-belysning manuellt



Bild Freeze /frys


Att frysa en bild på LCD-skärmen kan vara mycket användbart, då kan man även zooma in eller zooma ut eller ändra färgläge för en bättre överblick. Ljusstyrkan kan ej ändras vid fryst bild.

- ❑ Tryck Freeze /frys -knappen  - fryser bilden
- ❑ Tryck igen på Freeze /frys -knappen  släpper bilden
- ❑ När fryst bild finns, kan du använda följande kombinations-knappar för att navigera.


Uppåt: håll Ström  och tryck på Zooma in 

Nedåt: håll Ström  och tryck Zooma ut 

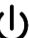Åt vänster: håll Ström  och tryck Förstärkt Färg 





Åt höger: håll Ström  och tryck sant Färg 




Bildlagring

- När fryst bild används, tryck då Freeze-knapp 
3 sekunder för att lagra den aktuella bilden.
Du kan spara upp till 20 bilder.
- När de sparade bilderna når det maximala värdet (20 bilder), måste du ta bort några bilder först i uppspelningsläge innan ny bild kan lagras (Minnet -fullt Ikon -visas).

Bildvisning

- För att komma in i uppspelningsläget tryck på Kontrast-knappen  3 sekunder



- ❑ Tryck Zooma in  och den Zooma ut  Välj målbilden från galleriet. Tryck den Kontrastknappen  för att se bilden. Du kan visa och navigera bilden med samma funktioner beskrivits tidigare med förstoring och förflyttning. Tryck Freeze-knapp  att återgå till galleriet.

- ❑ Tryck på Focus Kontrollknapp  för radera bild. Trycka på Focus Kontrollknapp  igen för att bekräfta. Tryck annan knapp för att avbryta. Håll fokus Kontrollknapp  5 sekunder för att radera **alla** bilder, tryck





på Focus Kontrollknapp  igen för att bekräfta.
Tryck annan knapp för att avbryta.

- Långt tryck på Kontrast  3 sekunder för att lämna uppspelningsläge



Linje & mask

Tryck och håll ner strömknappen , tryck på knappen fokuskontroll  man växlar då mellan olika läslinjer

- En horisontell linje
- Horisontell mask

- Normalläge, ingen linje och mask
- Tryck och håll ner strömknappen  tryck sedan på Zooma in knapp  eller Zooma ut knappen , detta ändrar placeringen av läslinjen eller ändra avståndet mellan masker. Ljusstyrkan justerings är inte tillåtet i linje & maskläget
- Tryck på strömbrytaren  igen för att återgå till det normala

Fokuskontroll

- Tryck på knappen fokuskontroll  aktiverar fokus
- Långt tryck på knappen fokuskontroll  3 sekunder låser fokus



Minne

Enheten kommer vid avstängning automatiskt memorera de senaste inställningarna såsom färgläge, förstoring, pip ljud.


Auto energispar

Om enheten inte används inom 3 minuter, kommer enheten att stängas av automatiskt.

Återställning -fabriksinställningar

Håll Freeze/frys knapp  och samtidigt knappen fokuskontroll  i 5 sekunder. Detta återställer till fabriksinställningarna. Automatisk avstängning sker vid återställning.

Hårdvaruåterställning

När enheten låser sig eller inte kan stängas av normalt. Tryck på Ström  + Freeze-knapp  + True Color knapp  samtidigt för att verkställa s.k hårdvaruåterställning.

Felsökning

Enheten slås inte på

- Anslut till nätadaptern
- Ladda batteriet
- Hårdvaruåterställning

Svart skärm eller vit skärm

- Om enheten ligger på en plan ren yta, kan skärmen vara svart eller vit, Lyft enheten för att säkerställa förändring sker.
- Justera förstoringen
- Justera färgläge
- Starta enheten
- Hårdvaruåterställning

Bilden ändras inte

- Om enheten är i frys-läget eller uppspelningsläge av bilder, kommer bilden inte ändras
- Tryck på strömbrytaren för att kontrollera aktuell status
- Starta enheten

- Hårdvaruåterställning

Fläckar eller smuts på skärmen

- Justera ljusstyrkan
- Rengör LCD-skärmen och kameran

Kontakta din lokala återförsäljare om problemet inte är löst

Specifikationer

- **Display:** 7 tums widescreen LCD
- **Kamera:** Autofokus, 720p @ 60fps
- **Storlek:** <= 176* 145* 25mm
- **Vikt:** <450 gram
- **Färgläge:** Fullfärg, 5 kontrastfärger kort lista; 18

-
- **Förstoring:** kontrastfärger lång lista
2,2X - 16x
 - **Batteri:** Inbyggt uppladdningsbart Li batteri; 4 timmars kontinuerlig användning; cirka 4,5 timmar laddning
 - **Strömadapter:** Micro USB-port; input: 110-240V; utgång: 5V / 2A