


# Snabb manual CLOVER 7

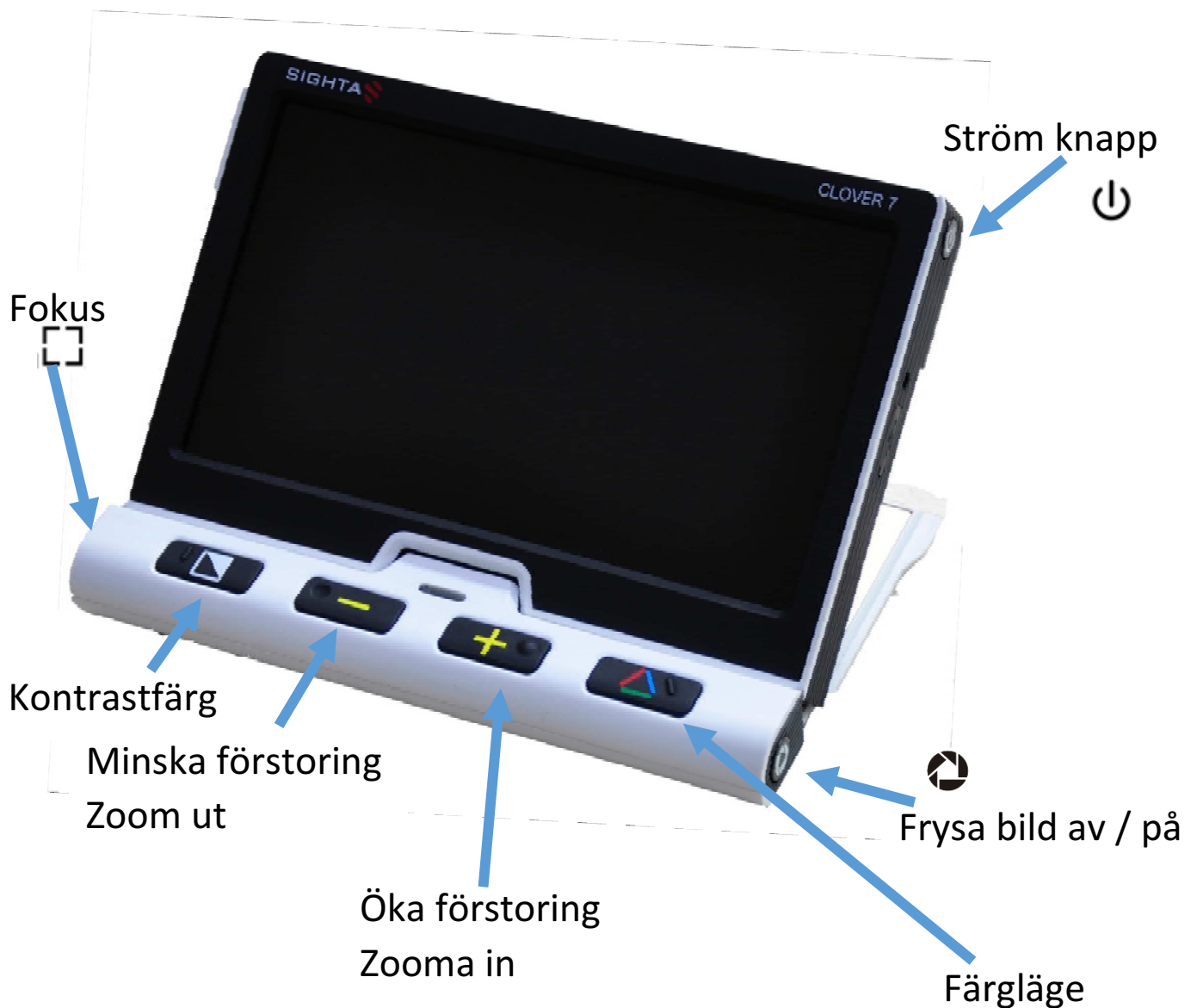

## Flytta / navigera i en fryst bild

Ström	⏻	& Kontrast	▢	Flytta bild vänster
Ström	⏻	& Zoom ut	—	Flytta bild neråt
Ström	⏻	& Zoom in	+	Flytta bild uppåt
Ström	⏻	& Färgläge	▴	Flytta bild höger



Tryck på Fokus för aktivering  
Långt tryck (3 sek) låser fokus

# Snabb manual CLOVER 7

## Ljusstyrka

Tryck: Ström knapp  & Zoom in  , öka ljusstyrka

Tryck: Ström knapp  & Zoom ut  , minska ljusstyrka

---

## LED ljus

Tryck: Ström knapp  & Frysknapp  , av /på LED ljus


---

## Läslinjer

Tryck Ström knapp  & Fokus  växlar olika läslinjer

---

## Bilder

I läge med fryst bild håll ner Frys knappen 3 sek  så lagras bilden.

Tryck Färgläge  3 sek till bildmapp.

Tryck Zoom In  och Zoom ut  för att bläddra i mini

bilderna tryck sedan Färgläge  knapp för att välja bild

Tryck Färgläge  3 sek för att gå bildmappen.