

Snabb manual IBIS FHD PRO



+ Zooma in

- Zooma ut

Tryck både plus och minus



knapparna för att växla mellan autofokus och manuell fokus.



Då fyrfärg är på:
Kort tryckning:
Ändra **vitbalansen** mellan de två stegen.



Då tvåfärg är på:
Kort tryckning:
Ändra **kontrast** mellan de tre stegen.



Läslinjer:
Håll mittknappen i 2 sekunder. Stäng av igen genom samma förfarande



Om du vill växla mellan olika videoformat, tryck och håll mittknappen i 10 sekunder. Växla mellan formaten med piltangenterna höger / vänster. Tryck på mittknappen för att välja format. Därefter startar apparaten



Positiva färger:
Full Färg =>
Röd / Svart =>
Röd / Blå =>
Grön / Svart =>
Orange / Svart =>



Negativa färger:
<= Full Färg
<= Svart / Vit
<= Blå / Gul
<= Svart / Grön
<= Svart / Orange

